

Aeroszol izotóniás oldat tengervízzel és nátrium-hialuronáttal a mindennapi orr- és fülhigiéniahoz gyermekek és felnőttek számára.

Mi az Aliamare®?

Az Aliamare® egyesíti a Bréhat szigetcsoport – a Bretagne-félsziget “Natura 2000” címmel ki-tüntetett természetvédelmi területe – tengervízének, valamint a hialuronsavnak váladékoldó és gyógyító hatását. A hialuronsav magas vízmegkötő képessége által segíti a nyálkahártya nedvesen tartását, és gyorsítja az esetleges apró sérülések gyógyulását. A hígított tengervízből készült izotóniás koncentrátum megakadályozza, hogy az Aliamare® a nyálkahártyát irritálja.

**ÖSSZETÉTEL**

A 100 ml-es szóróflakon tartalma: tengervíz, nátrium-hialuronát.

**JAVALLAT**

**Orr:** Túlzott váladékképződés esetén segíti a kiürülést és nedvesen tartja a kiszáradt orrnyálkahártyát. Használata az orrüregben végzett műtéti beavatkozások után is hasznos.

**Fül:** Megakadályozza a fülzsír okozta dugulást, és hallókészüléket viselők esetében segíti a hallójáratok tisztán tartását.

**ALKALMAZÁSI GYAKORISÁG**

Naponta többször, egyéni igény szerint.

**TERMÉKLEÍRÁS**


Túlnyomás alatt álló szóróflakon 100 ml oldattal + 1 db orr-szórófej + 1 db fül-szórófej, lezárt tasakokban. Az oldat a fém szóróflakonon belül egy nem toxikus anyagból készült tasakba van töltve, így az a hajtóanyagtól el van zárva. A hajtóerőt a nyomás alatt a szóróflakonba engedett levegő szolgáltatja, amely az abban elhelyezett tasakot körbefogja. A permetezés a tasak felső részén elhelyezett szelepen keresztül történik.

**A rendszer**

- levegőt használ hajtógázként, tehát **NEM KÁROSÍTJA AZ ÓZONRÉTEGET**.
- nem tartalmaz tartósítószeret, ami **CSÖKKENTI AZ ALLERGIÁS REAKCIÓ** lehetőségét.
- lehetővé teszi, hogy a szóróflakont bármilyen testhelyzetben használni lehessen. **PRAKTIKUS és KÖNNYŰ HASZNÁLNI.**

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

1. Távolítsa el a zárókupakot és helyezze a szórófejet a szelepre: az orrhoz az „A” ábrán jelölt szórófejet, a fülhöz a „B” ábrán jelölt szórófejet használja.
2. Az oldat permetezéséhez nyomja le a szórófejet.

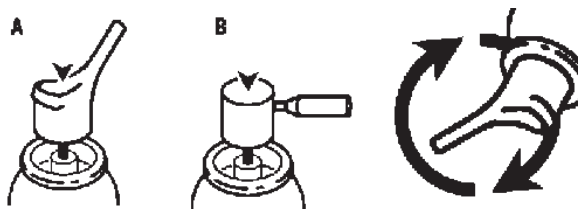

3. Használat után a szórófejet tisztítsa meg és szárítsa meg.

**Orr:** A termék minden testhelyzetben használható. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy a fejét fordítsa oldalra, és a terméket kb. 2 másodpercig permetezze az ellentétes orrlyukba (pl. jobb-ra döntött fej, fújás a bal orrlyukba). A mozdulatot ismételve meg a másik orrlyuknál is.

**Fül:** A termék minden testhelyzetben használható. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy oldalra fordított fejjel hajoljon a mosdókagyló fölé, és az oldatot alulról 1-2 alkalommal permetezze a fülébe. Aztán várjon néhány másodpercet, és óvatosan törölje szárazra a fülét.

**BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK**

A terméket csecsemőknél csak orvosi utasításra alkalmazza.

Figyelem: Mivel a flakonban túlnyomás uralkodik, melegítésre felrobbanhat.

Közvetlen napfénytől védje és es ne tegye ki 50°C-ot meghaladó hőmérsékletnek.

Tartsa távol hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól, vagy gyújtásra alkalmas eszköztől!

A flakont elégetni vagy kiszúrni még üres állapotban is tilos.

Kerülje a dohányszást!

Ne nyelje le!

Kerülje a szemmel való érintkezést!

Az Aliamare® a csomagoláson «Lejárat» jelzéssel ellátott időpont után már nem használható.

Ha a flakon sérült, ne használja az Aliamare®-t.

A kezelést követően a szóróflakont az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

**GYEREKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!**

**KÖLCSÖNHATÁSOK**

Az Aliamare esetleges kölcsönhatása más készítményekkel a mai napig nem ismert.

**ELLENJAVALLAT ÉS NEM KÍVÁNATOS HATÁSOK**

Az Aliamare® alkalmazása nem ajánlott fülfolyásban (a külső hallójárat gyulladással megbetegedése), dobhártya perforációban vagy krónikus középfülgyulladásban szenvedő személyek esetén. Az Aliamare® használatával összefüggő, nem kívánatos mellékhatások nem ismertek.

A tájékoztató legutolsó felülvizsgálatának dátuma: 2017. november  
CE bizonylat kiadása: 2010

**Gyártó:**

IBSA Farmaceutici Italia srl

Via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 Lodi

Olaszország



**Magyarországon a forgalmazásért felelős:**

IBSA Pharma Kft.

1124 Budapest, Fodor u. 54/B.



Közvetlen napfénytől védje



Figyelmeztetés: olvassa el figyelmesen a biztonsági figyelmeztetéseket



Legmagasabb tárolási hőmérséklet



Gyártási szám (Gy. sz.:)



Lejáratú idő (Lejárat:)