

ialuset® krém

nátrium-hialuronát 0,2%



TULAJDONSÁGOK

Az ialuset® nátrium-hialuronátot tartalmaz, azaz a hialuronsav nátrium sóját. A hialuronsav egy fontos összetevője a bőrt felépítő alapanyagoknak. Nagy vízmegkötő tulajdonságának köszönhetően hozzájárul a bőr megfelelő szintű hidratáltságának fenntartásában.

Kiegészítő szerepe van a bőrsérülés szöveti regenerációjában; megfelelő mikro-környezet kialakításával támogatja sebgyógyulás- és az újrarámósodás folyamatát.

JAVALLAT

Az ialuset® nem fertőzött seb és égés kezelésére javasolt – váladékkal vagy anélkül – lábszárfekélyre – vénás eredetnél is; bőr repedés; sipoly; felfekvés; műtét utáni seb; kirepedezett bőrelváltozások; és kémiai vagy fizikai eredetű kisebbedés.

ÖSSZETEVŐK

Nátrium-hialuronát 0,2%, cetearil-glukozid, olajsav-decilészter, cetearil-alkohol, nátrium-lauril-szulfát, nátrium-cetearil-szulfát, tiszta vízmentes glicerin, 70% szorbitol, szorbinsav, metil-parahidroxibenzoát, propil-parahidroxibenzoát, vízmentes trinátrium-citrát, ionizált víz.

FORMA és MEGJELENÉS

100 g túlnyomásos palack

ALKALMAZÁS

Használat előtt a sebet gondosan tisztítsa meg, majd az alábbi leírásnak megfelelően folytassa az alkalmazást.

2-3 mm vastag rétegben tegye a krémet közvetlenül a sebbe-, vagy steril gézlapra, és azt helyezze a sebre. Megfelelő kötéssel a géz a helyén tartható.

24 óránként alkalmazza a krémet a teljes sebgyógyulásig.

A seb gyógyulását orvos értékelje.

HASZNÁLAT ELŐTTI FIGYELMEZTETÉS

Túlnyomásos palack: tisztítása minden használat előtt javasolt, a szórófej rövid lenyomásával annak végen maradt kismennyiségű krémet eltávolítva.

Figyelmeztetés: a palack nyomás alatt van, melegítésre felrobbanhat.

Napfénytől távol tartandó és 50°C meghaladó hőnek ne tegye ki.

Tartsa távol hőtől, meleg felszíntől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtásra alkalmas eszköztől.

Ne ütögesse vagy égesse el a palackját még használat után sem.

Ne dohányozzon!

Ne nyelje le!

Kerülje, hogy szembe kerüljön!

Tartsa be a sérült-, égett bőr- és környékének tisztításához és fertőtlenítéséhez szükséges előírásokat.

Minden kezelés előtt a seben korábbi kezelésből megmaradt krémet vízzel könnyen eltávolíthatja.

Vénás fekély esetén is használhatja az ialuset®-et kompressziós kezeléssel együtt (harisnya vagy kötés).

Ne használja az ialuset®-et ha csomagolás sérült.

Bármilyen kérdése van az ialuset® alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

Csak külsőleges használatra.

Gyermekektől távol tartandó!

ELLENJAVALLATOK

Az ialuset®-et ne használja ismert túlérzékenység (nátrium-hialuronátra vagy egyéb összetevőjére) esetén.

MELLÉKHATÁSOK

Ritkán megfigyeltek helyi túlérzékenységi reakciót, mint például ekcémát.

HA OLYAN NEM KÍVÁNT HATÁST TAPASZTAL, AMI EBBEN A TÁJÉKOZTATÓBAN NINCS MEGEMLÍTVE, KÉRJE ORVOSA VAGY GYÓGYSZERÉSZE TANÁCSÁT.

TÁROLÁS

Ne használja a csomagoláson lévő lejáratú idő után.

25°C alatti hőmérsékleten tárolja.

CE (orvostechikai eszköz) minősítésének éve: 2012

A tájékoztató utolsó ellenőrzésének dátuma: 2018 április


GYÁRTÓ

IBSA Farmaceutici Italia srl

Via Martiri di Cefalonia, 2 – 26900 Lodi – Olaszország

Magyarországon a forgalmazásért felelős: IBSA Pharma Kft.


1124 Budapest, Fodor u 54/B Tel: (1) 225 7775

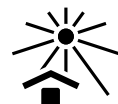

Közvetlen napfénytől védje



Olvassa el a használati útmutatót

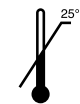

Legmagasabb tárolási hőmérséklet 25°C



Gyártási szám



Felhasználható