

Aeroszol izotóniás oldat tenger vízzel és nátrium-hialuronáttal a mindennapi orr- és fülhigiénéhez gyermekek és felnőttek számára.

## MI AZ ALIAMARE®?

Az Aliamare® egyesíti a Bréhat szigetcsoport – a Bretagne-félsziget „Natura 2000” címmel kitüntetett természetvédelmi területe – tenger vizének, valamint a hialuronsavnak váladékoldó és gyógyító hatását. A hialuronsav magas vízmegkötő képessége által segíti a nyálkahártya nedvesen tartását, és gyorsítja az esetleges apró sérülések gyógyulását. Az Aliamare® higított tenger vízből készült izotóniás koncentrációjú oldata a nyálkahártyát nem irritálja.

## ÖSSZETÉTEL

A 100 ml-es szóróflakon tartalma: tenger víz, nátrium-hialuronát.

## JAVALLAT

**Orr:** Túlzott váladékképződés esetén segíti a kiürülést és nedvesen tartja a kiszáradt orrnyálkahártyát. Használata az orrüregben végzett műtéti beavatkozások után is hasznos.

**Fül:** Megakadályozza a fülzsír okozta dugulást, és hallókészüléket viselők esetében segíti a hallójáratok tisztán tartását.

## ALKALMAZÁSI GYAKORISÁG

Naponta többször, egyéni igény szerint.

## TERMÉKLEÍRÁS


Túlnyomás alatt álló szóróflakon 100 ml oldattal + 1 db orr-szórófej + 1 db fül-szórófej, lezárt tasakokban. Az oldat a fém szóróflakonon belül egy nem toxikus anyagból készült tasakba van töltve, így az a hajtóanyagtól el van zárva. A hajtóerőt a nyomás alatt a szóróflakonba engedett levegő szolgáltatja, amely az abban elhelyezett tasakot körbefogja. A permetezés a tasak felső részén elhelyezett szelepen keresztül történik.

A rendszer

- levegőt használ hajtógázként, tehát **NEM KÁROSÍTJA az ÓZONRÉTEGET.**
- nem tartalmaz tartósítószeret, ami **CSÖKKENTI az ALLERGIÁS REAKCIÓ** lehetőségét.
- lehetővé teszi, hogy a szóróflakont bármilyen testhelyzetben használni lehessen. **PRAKTIKUS és KÖNNYŰ HASZNÁLNI.**

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Távolítsa el a zárókupakot és helyezze a szórófejet a szelepre: az orrhoz az „A” ábrán jelölt szórófejet, a fülhöz a „B” ábrán jelölt szórófejet használja.

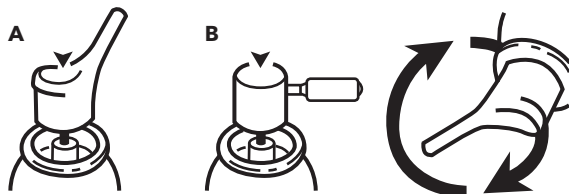

2. Az oldat permetezéséhez nyomja le a szórófejet.
3. Használat után a szórófejet tisztítsa meg és szárítsa meg.

**Orr:** A termék minden testhelyzetben használható. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy a fejt fordítsa oldalra, és a terméket kb. 2 másodpercig permetezze az ellentétes orrlyukba (pl. jobbra döntött fej, fújás a bal orrlyukba). A mozdulatot ismétlje meg a másik orrlyuknál is.

**Fül:** A termék minden térbeli helyzetben használható. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy oldalra fordított fejjel hajoljon a mosdókagyló fölé, és az oldatot alulról 1-2 alkalommal permetezze a fülébe. Aztán várjon néhány másodpercet, és óvatosan törölje szárazra a fülét.

### FIGYELMEZTETÉSEK

A terméket csecsemőknél csak gyermekorvosi utasításra alkalmazza.

Figyelem: Mivel a flakonban túlnyomás uralkodik, melegítésre felrobbanhat.

Közvetlen napfénytől védje és ne tegye ki 50°C-ot meghaladó hőmérsékletnek.

Tartsa távol hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól, vagy gyújtásra alkalmas eszköztől!

A flakont elégetni vagy kiszúrni még üres állapotban is tilos.

Kerülje a dohányzást!

Ne nyelje le!

Kerülje a szemmel való érintkezést!

Az Aliamare®-t ne használja a csomagoláson megadott időpont után!

Ha a flakon sérült, ne használja az Aliamare®-t.

A kezelést követően a szóróflakont az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

### GYEREKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!

### KÖLCSÖNHATÁSOK

Az Aliamare® esetleges kölcsönhatása más készítményekkel a mai napig nem ismert.

### ELLENJAVALLAT ÉS NEM KÍVÁNTOS HATÁSOK

Az Aliamare® alkalmazása nem ajánlott fülfolyásban (a külső hallójárat gyulladós megbetegedése), dobhártya perforációban vagy krónikus középfülgyulladásban szenvedő személyek esetén. Az Aliamare® használatával összefüggő, nem kívánatos mellékhatások nem ismertek.

Lejáratí idő: 36 hónap. A lejáratí idő az (orvostechnikai eszköz) felhasználhatóságát jelenti.

A tájékoztató utolsó ellenőrzésének dátuma: 2019. november

CE kiadás éve: 2010

#### Gyártó:

IBSA Farmaceutici Italia srl  
Via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 Lodi  
Olaszország

#### Magyarországon a forgalmazásért felelős:

IBSA Pharma Kft.  
1124 Budapest, Fodor u. 54/B.



Közvetlen napfénytől védje



Figyelmeztetés:  
gondosan olvassa el  
a figyelmeztetéseket



Legmagasabb  
tárolási  
hőmérséklet



Ne használja,  
ha sérült  
a csomagolás



Gyártási szám



Felhasználható