

# IALUSET® HL krém



**nátrium-hialuronát HL 0,4%**

## TULAJDONSÁGOK

A hialuronsav a bőr egyik alapvető összetevője, a sejten kívüli tér része (extracelluláris matrix), ami biztosítja az egészséges bőr hidratáltságát és rugalmasságát.

A hialuronsav, különleges vízmegkötő képessége által, kedvező mikro-környezetet biztosít a sérült bőrnek, így segíti annak biológiai és élettani tulajdonságainak helyreállítását.

Az **ialuset® HL** kis és nagy molekulású hialuronsavak kombinációja. A különböző méretű hialuronsav molekulák egymás hatását erősítik. Ez teszi lehetővé hogy a krém olyan magas koncentrációban tartalmazza a hialuronsavat, ami segíti a bőr természetes regenerálódását annak minden rétegében (hám és felhám).

Az **ialuset® HL**-ben lévő kis- és nagy molekulatömegű hialuronsavat biofermentációval állították elő; a láncok közötti kapcsolat kémiai módosítástól mentes, és egy szabadalmaztatott hőkezelési eljárással került kialakításra, ami biztosítja a krém kiváló tolerálhatóságát.

## JAVALLAT

Az **ialuset® HL** javasolt sérült bőr kezelésére: nem fertőzött sebek, vágás, égés, lábszárfekély, berepedések a bőrön (pl. kéz), sipoly, felfekvés, hámlással járó bőrelváltozás, hegesedés és felhám-sérülés.

Az **ialuset® HL** javasolt közepes és súlyos bőrirritációk, dehidratált bőr, akár radiológia-sugár kezelés után is.

Az **ialuset® HL** alkalmazható a nehezen gyógyuló sebek hegesedési folyamatába, (pl.: nem fertőzött égés, lábszárfekély, berepedések a bőrön (kéz), sipoly, felfekvés), vagy súlyos hegeknél, akár műtét után is a bőr élettani állapotának visszaállítása érdekében (rekonstrukciója).

## ÖSSZETEVŐK

Nátrium-hialuronát HL 0,4%, cetearil-glukozid, olajsav-decilészter, cetearil-alkohol, nátrium-lauril-szulfát, tiszta vízmentes glicerin, 70% szorbit, szorbinsav (természetes tartósítószer), metil-parahidroxibenzoát, propil-parahidroxibenzoát, vízmentes nátrium-citrát, tisztított víz.

## FORMA ÉS MEGJELENÉS

25 g tubusban

## ALKALMAZÁSA

Minden alkalmazás előtt a sebet gondosan tisztítsa meg, majd az alábbi leírásnak megfelelően folytassa.

2-3 mm vastag rétegben tegye a krémet közvetlenül a sebbe, vagy steril gézlapra, és azt helyezze a sebre. Megfelelő kötéssel a géz nem mozdul el. Használja az **ialuset® HL**-t 24 óránként a teljes sebgyógyulásig.

30 napnál tovább ne használja a krémet.

**A seb gyógyulását orvos értékelje.**

## HASZNÁLAT ELŐTTI FIGYELMEZTETÉS

Minden használat után gondosan zárja vissza kupakot a tubusra.

Tartsa be a sérült, égett bőr és környékének tisztításához és fertőtlenítéséhez szükséges előírásokat.

Minden kezelés előtt a seben maradt korábbi krémet vízzel könnyen eltávolíthatja.

Lábszárfekély esetén az **ialuset® HL**-t használhatja kompressziós kezeléssel együtt is (harisnya vagy kötés).

Ne használja az **ialuset® HL**-t, ha a csomagolás sérült.

Bármilyen kérdése van az **ialuset® HL** alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

Csak külsőleges használatra.

Ne nyelje le.

Gyermekektől távol tartandó.

## ELLENJAVALLATOK

Az **ialuset® HL**-t ne használja ismert túlérzékenység (nátrium-hialuronátra vagy egyéb összetevőjére) esetén.

## NEM KÍVÁNT HATÁSOK

Helyi túlérzékenységi reakció alkalmanként előfordulhat.

**FORDULJON ORVOSHOZ VAGY GYÓGYSZERÉSZHEZ HA BÁRMILYEN NEM KÍVÁNT HATÁST TAPASZTAL, AMI EBBEN A TÁJÉKOZTATÓBAN NINCS MEGEMLÍTVE.**

## TÁROLÁS:

**NE HASZNÁLJA A CSOMAGOLÁSON LÉVŐ LEJÁRATI IDŐ UTÁN.**

25°C alatti hőmérsékleten tárolja.

A krém a tubus kinyitásától számított 90 napon belül használható.

Lejárató idő: 36 hónap. A lejárató idő az (orvostechikai eszköz) felhasználhatóságát jelenti.

CE (orvostechikai eszköz) kiadás éve: 2019.

A tájékoztató utolsó ellenőrzésének dátuma: 2019. november

## GYÁRTÓ:

IBSA Farmaceutici Italia srl.

Via Martiri di Cefalonia, 2 – 26900 Lodi – Olaszország



**Magyarországon a forgalmazásért felelős:** IBSA Pharma Kft.

1124 Budapest, Fodor u. 54/B



Közvetlen  
napfénytől védje



Olvassa el  
a használati  
útmutatót



Legmagasabb  
tárolási  
hőmérséklet  
25°C



Ne használja,  
ha sérült  
a csomagolás



Gyártási szám



Felhasználható